

Desfibrilador de Entrenamiento CardiAid



En simulador de desfibrilador CardiAid es una eficiente herramienta de formación en RCP que permite entrenar el uso de un DESA en general y el modelo CardiAid AED en particular.

Posee la misma apariencia que el desfibrilador externo semiautomático CardiAid y favorece que los alumnos se familiaricen con el equipo real.

Permite la simulación de todos los escenarios que un usuario se puede enfrentar en una situación real de Resucitación Cardiopulmonar y entrenarse en las acciones a tomar en cada una de ellas.

El instructor puede operarlo mediante el mando a distancia, puede configurar diferentes escenarios de forma instantánea conforme a las necesidades individuales de cada alumno y/o el tema a entrenar en cada sesión.

Disponible en 23 idiomas incluido el español.

Características Técnicas:

- Posibilidad de simular las siguientes situaciones: que el paciente se mueve o alguien lo toca durante el análisis del ritmo cardiaco, que el desfibrilador detecta ritmo sinusal normal, asistólico u otro ritmo cardiaco que no requiere descarga.
- Escenarios de simulación: Taquicardia Ventricular (VF) y Fibrilación Ventricular (VF) durante el análisis del ritmo cardiaco
- Simulación de errores de sistema tales como si el equipo no puede ser utilizado por fallo técnico, si la batería está agotada o es insuficiente.
- El entrenador de DESA CardiAid permite cambiar de modo semiautomático a automático
- La configuración estándar del DESA de entrenamiento es RCP con 2 insuflaciones pero si se desea se puede configurar para que únicamente sea la maniobra de RCP sin ventilación.
- Configuración del metrónomo. La configuración de fábrica es 100 lpm pero puede ser configurado a 110 lpm ó 120 lpm, según el deseo del usuario.
- Ajuste de volúmen
- Datos de entrenamiento: Si se presiona el botón de información, el instructor puede obtener datos de la sesión de formación tales como duración de la misma y descargas administradas.