

B.I.G SALVA VIDAS ACORTANDO TIEMPO

Para resucitaciones de emergencia en codiciones de riesgo de vida, la B.I.G. permite un acceso vascular inmediato.

"Conforme con los Servicios Medicos para establecer acceso I.O. si el acceso I.V. no es posible"

AHA 2010 ACLS (Class IIa, LOE C)

I.O. es recomendado por destacadas organizaciones de servicio de emergencias:

- Asociación Americana del Corazon (ACLS, PALS)
- Comité Internacional Organizador en Resucitación
- Consejo Europeo Resucitación
- Asociación Nacional de EMS Médicos
- Consorcio de entrenamiento cardiaco en Acceso Intraóseo Vascular
- Organizaciones Múltiple de Profesionales de la enfermeria (INS, ENA, AACN, ATNA, SPN)

Cuando el acceso I.V. es dificil o imposible, usa la B.I.G. para una simple y fácil infusión Intra Osea en pacientes adultos y pediátricos.



SIMPLY SAVING LIVES



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105064195

Tecnomed 2000, S.L

C/ Palos de la Frontera,4, 3ª planta - 28320 Pinto - Madrid - España

Tel.: 915300117


E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com

www.tecnomed2000.com



TECNOMED 2000
electromedicina

BIG Adulto– 15 G

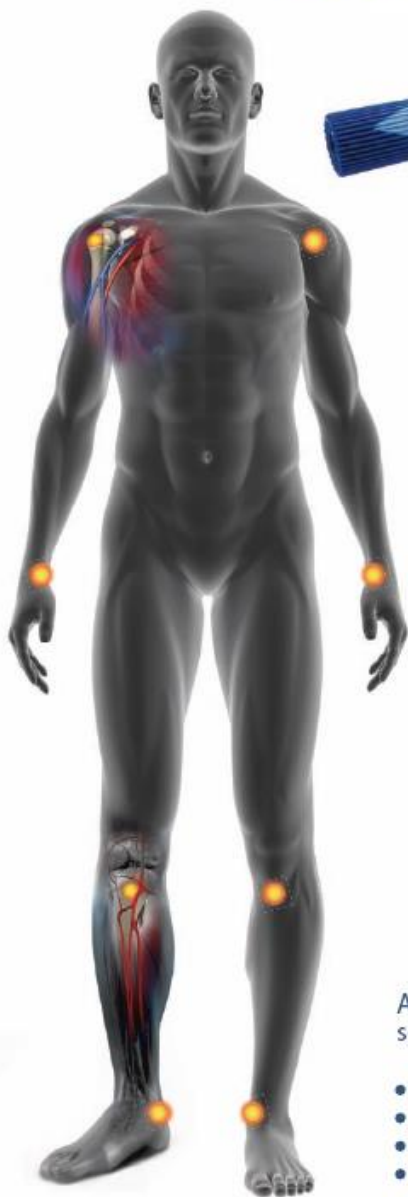

Ajuste profundidad de penetración según el lugar de inserción:

- Tibia Proximal: 2.5cm
- Húmero Proximal: 2.5cm
- Tibia Distal: 2cm
- Radio Distal: 1.5cm

Acceso IO Inmediato para administrar líquidos y medicamentos

Acceso Vascular en Segundos

- * 5 años de vida útil
- * Listo para usar
- * Estéril
- * Un solo uso
- * Pequeño y ligero
- * No requiere carga externa
- * Desechable - No contamina
- * No requiere mantenimiento
- * Aguja No expuesta
- * Homologado CE & FDA

BIG Pediátrico– 18 G



Ajuste profundidad de penetración según la edad del paciente:

- 0-3 años: 0.5-1cm
- 3-6 años: 1-1.5cm
- 6-12 años: 1.5cm